


Ändra målvärdet i mySugr


1. Klicka på symbolen längst ned till höger på skärmen där det står *Mer*



2. Klicka på *Profil & Inställningar*

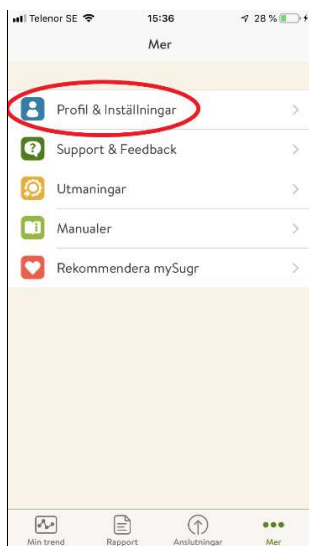

3. Klicka på *Kontrollera blodsocker*

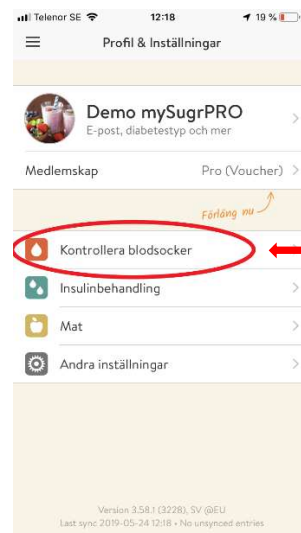

4. Här ändrar du målvärdet. Du kan också ändra varningsgränserna för *Hyper* (för högt blodsocker) och *Hypo* (för lågt blodsocker)



OBS: Tänk på att rådgöra med din vårdgivare innan du ändrar målvärde eller varningsgränser.

Tips: Om du ändrar ditt blodsockermålvärde i mySugr så ändras målvärdet automatiskt i Accu-Chek Instant mätaren vid nästa synkronisering.