



Anslut Apple hälsa till mySugr:

1. Säkerställ att Bluetooth är aktiverad på din Smartphone


2. Klicka på anslutningar

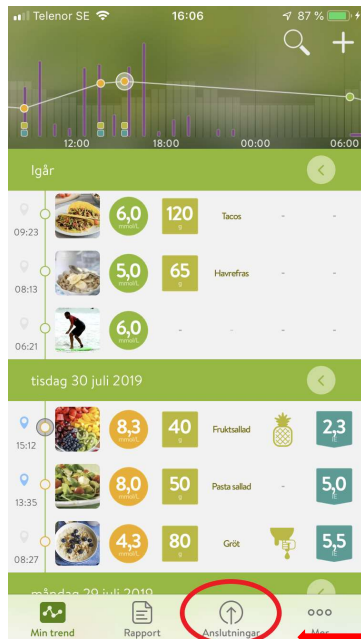


3. Klicka på *Apple Hälsa*

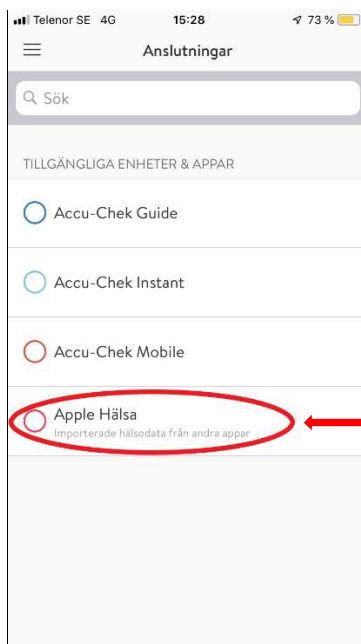

4. Klicka på *Anslut*

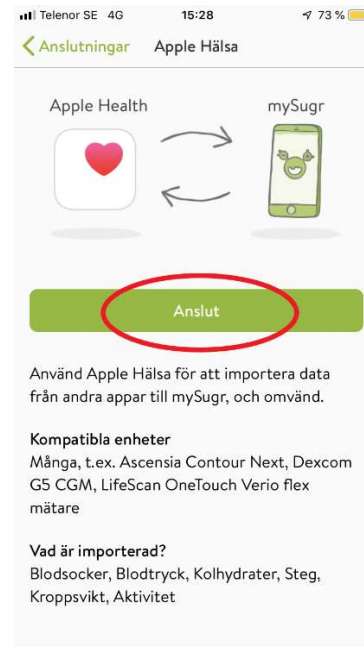


5. Så enkelt var det, nu är mySugr appen kopplad med Apple Hälsa appen på din Smartphone

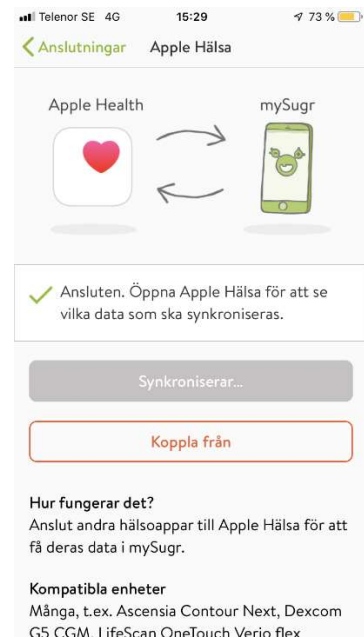




Tips1: Du kan gå in i Apple Hälsa appen och välja vilken data du vill kunna föra över till mySugr.


Tips2: Du kan också själv anpassa vilken data som ska visas. Du kan tex se stegräknaren (Aktivitet) direkt i dagboken och grafen.

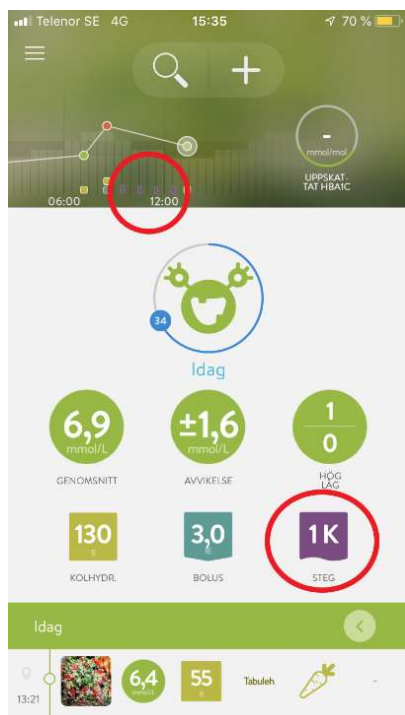

Tips3: Om du dubbelklickar någonstans på grafen längst upp i dagboken får du upp en vy där du kan välja vilken data som visas

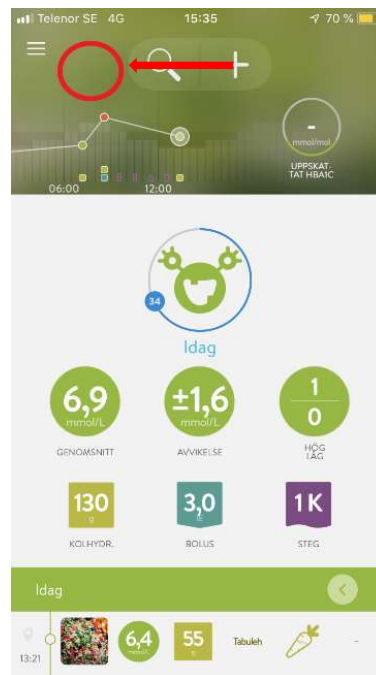

& I denna vy kan du välja vilken data som ska visas

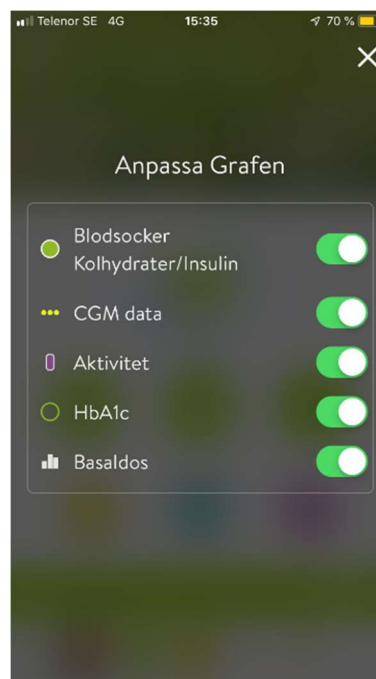

Besök gärna www.accu-chek.se/mysugr för att läsa mer om mySugr och du är alltid välkommen att kontakta Accu-Chek kundsupport på **020-41 00 42** om du har frågor om någon av våra produkter.