



## Anslut en Accu-Chek blodsockermätare till mySugr appen\*

1. Säkerställ att Bluetooth är aktiverat på din smartphone

2. Klicka på anslutningar

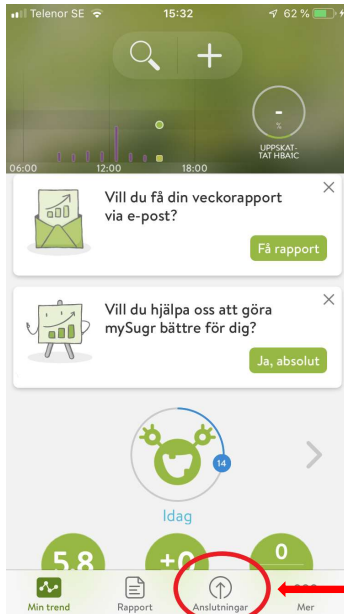


3. Välj och klicka på den Accu-Chek mätare du vill koppla till mySugr (i detta exempel används en Accu-Chek Instant mätare).

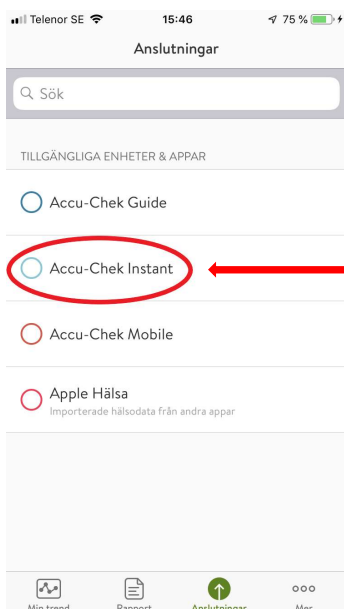

4. Klicka på *Anslut nu*



5. Tryck på din Accu-Chek mätare enligt instruktionerna i appen

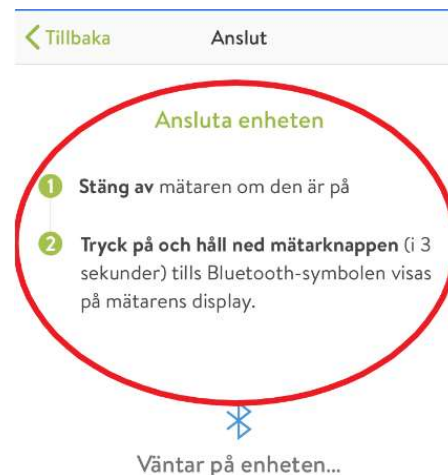

Besök gärna [www.accu-chek.se/mysugr](http://www.accu-chek.se/mysugr) för att läsa mer om mySugr och du är alltid välkommen att kontakta Accu-Chek kundsupport på **020-41 00 42** om du har frågor om någon av våra produkter.

## 6. Klicka på *Nästa: Ange PIN-kod*



## 7. Ange PIN-koden från din Accu-Chek mätare



## 8. Grattis, nu är din Accu-Chek mätare kopplad till din mySugr appen



*Tips1:* Visste du att du nu blivit uppgraderad till mySugr PRO helt kostnadsfritt och kan ta del av alla dess fördelar? Men tänk på att göra minst en loggning var 30e dag annars försvinner PRO funktionen.

*Tips2:* Om du ändrar ditt blodsockermålvärde i mySugr så ändras målvärdet automatiskt i Accu-Chek Instant mätaren vid nästa synkronisering.

\*I nuläget är Accu-Chek Instant, Accu-Chek Guide och Accu-Chek Mobile adapter kompatibla med mySugr appen. I detta exempel används en Accu-Chek Instant mätare.