


Sök i loggboken:


1. Börja med att klicka på förstöringsglaset




2. När du kommit till denna bild har du två alternativ: **2a**-> klicka på någon av ikonerna eller **2b**-> skriva in en sök text.

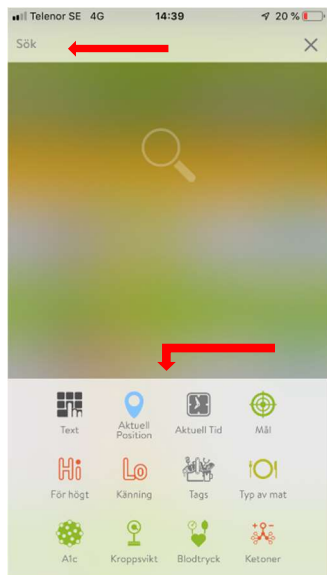

2a. Om man klickar på en ikon tex *Hi* (högt blodsocker) så får man fram alla loggade blodsockervärden som varit över varningsgränsen för högt blodsocker.

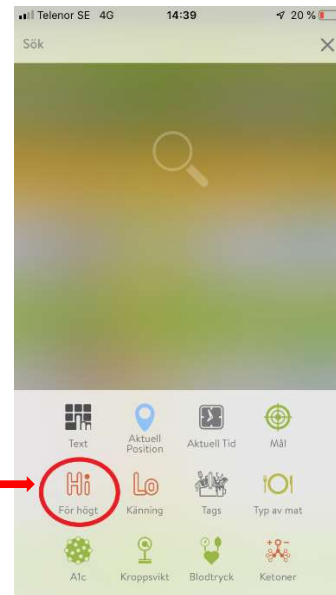


Det kan se ut så här:

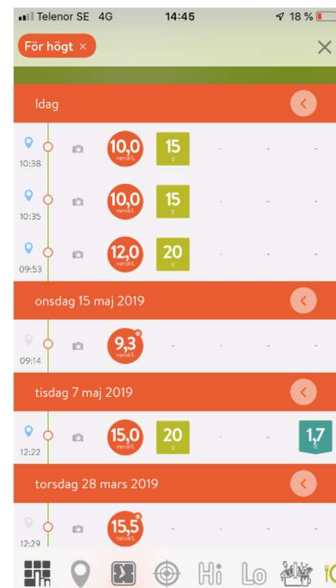



2b. Du kan även hitta loggningar du gjort genom att skriva in en sök text. På detta sätt kan du tex söka efter maträtter som du tidigare loggat. I detta exempel har vi skrivit in söktexten *gröt*. För att få fram loggningarna trycker du antingen på något av textförslagen som kommer fram eller på **KLART**

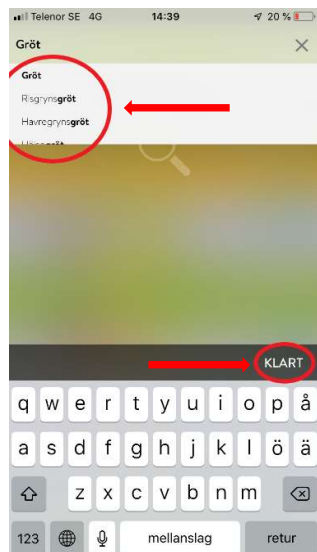

Det kan se ut som på bilden nedan. Tex kan du nu se hur många kolhydrater du loggade senast du åt gröt.



Besök gärna www.accu-chek.se/mysugr för att läsa mer om mySugr och du är alltid välkommen att kontakta Accu-Chek kundsupport på **020-41 00 42** om du har frågor om någon av våra produkter.